



Placa de antebrazo

Elbow & Forearm System

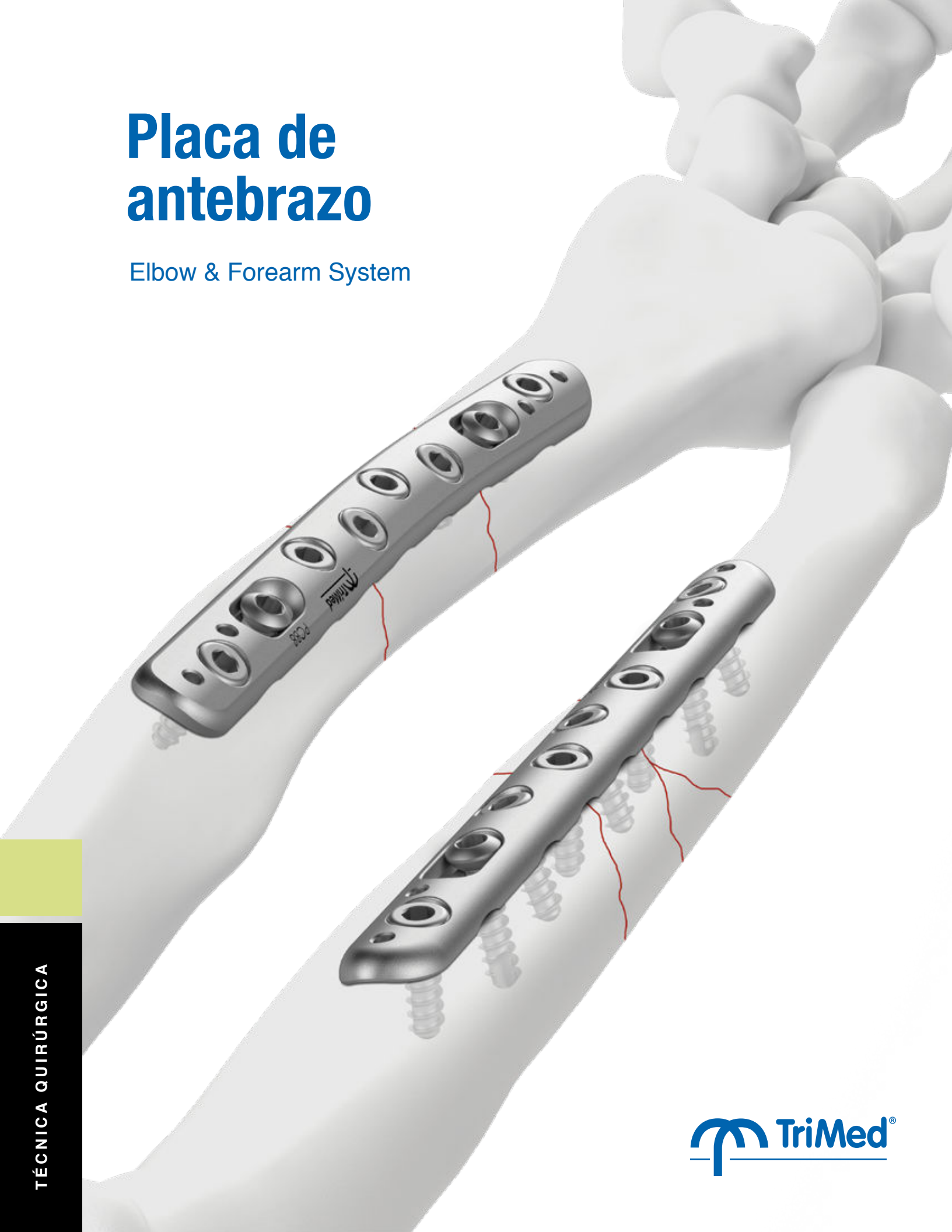


TÉCNICA QUIRÚRGICA

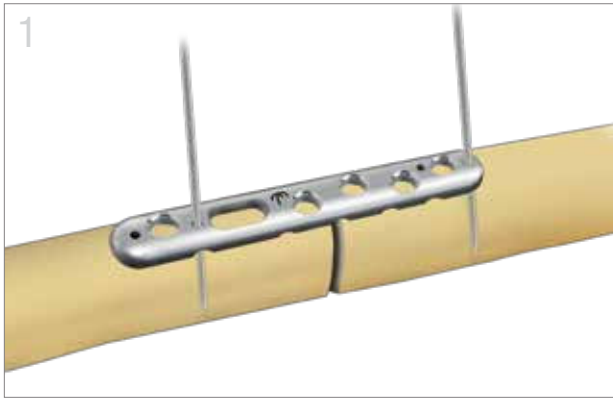


Colocación de placas

- Coloque la placa sobre el hueso utilizando K-Wires provisionales, si corresponde.

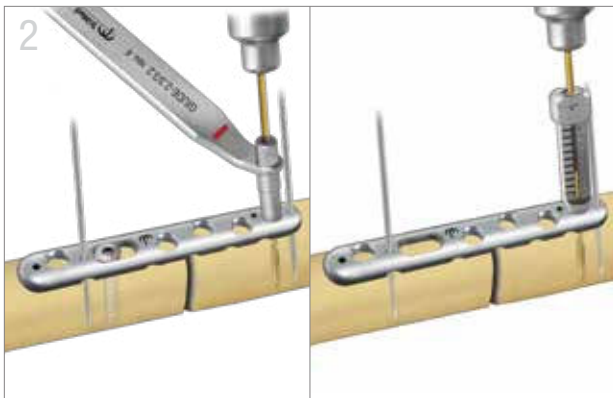

Inserción de tornillos

- Para utilizar un tornillo cortical sin bloqueo, utilice GUIDE-2.3/3.2 (roja) y una broca larga de 2,3 mm (roja).
- Para utilizar un tornillo cortical de bloqueo, utilice GUIDELCBS-2.3 y una broca larga de 2,3 mm (roja).

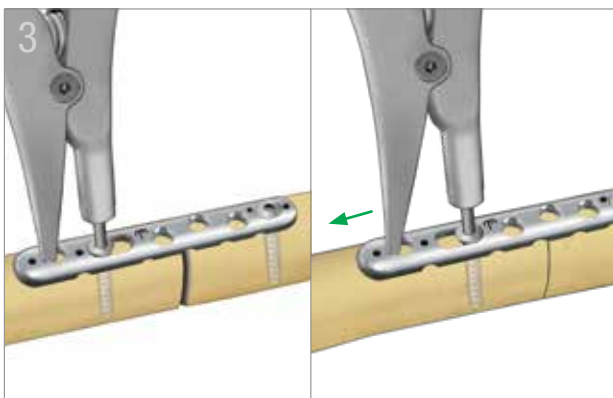

Compresión

- Fije la placa con un tornillo en el lado de la fractura y lejos del orificio ranurado. En el otro lado de la fractura, coloque un tornillo cortical en el orificio ranurado. No apriete este tornillo del todo.
- Enganche la punta del destornillador de la herramienta de compresión/expansor en el tornillo del orificio ranurado. Inserte la mordaza de la herramienta en el orificio del tornillo adyacente, lejos de la línea de la fractura.
- Apriete con suavidad el mango para comprimir la fractura. Apriete el tornillo en el orificio ranurado.



Fijación final

- Fijación completa con tornillos adicionales.

Todos los implantes están hechos con acero inoxidable de grado quirúrgico