



Olecranon Hook Plate™


Elbow & Forearm System

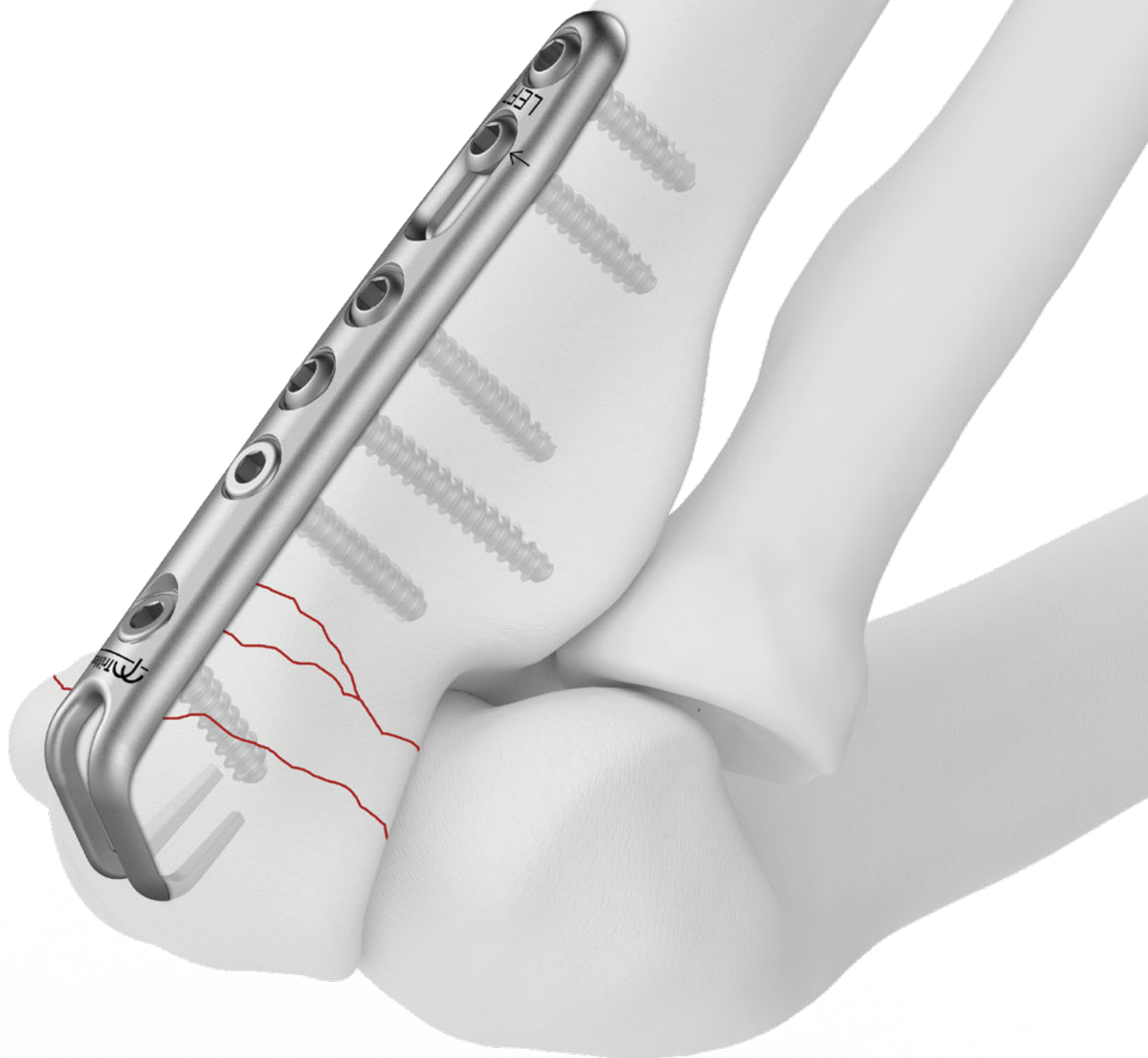

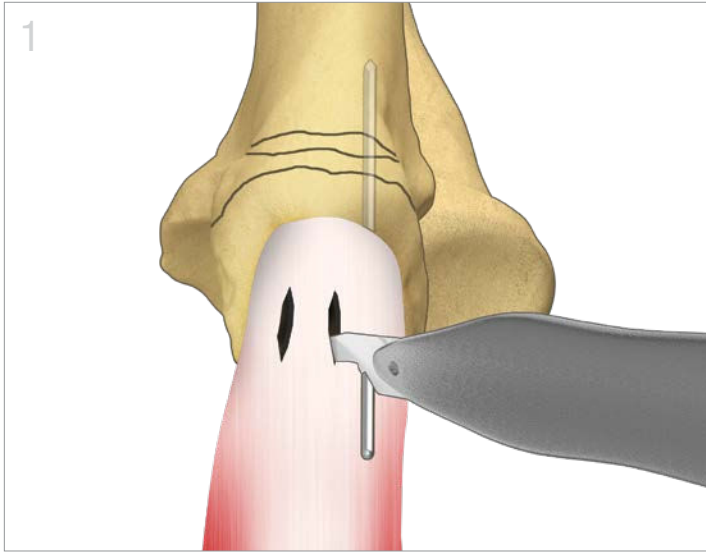


Exposición y reducción

- Exponga el olécranon con un abordaje posterior estándar.
- Reduzca la fractura y sujétela con K-Wires.
- Realice dos incisiones longitudinales en línea con las fibras de la inserción del tríceps hasta la punta proximal del olécranon.

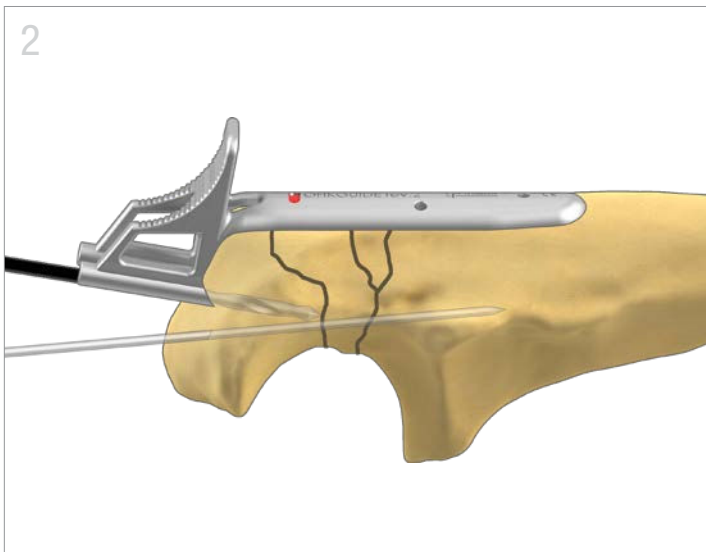


Preparación de la guía

- Aplique la Hook Drill Guide al olécranon asegurándose de que la guía esté completamente asentada y al ras con el hueso. Perfore dos orificios a través del córtex externo con una broca de 2,3 mm (roja).

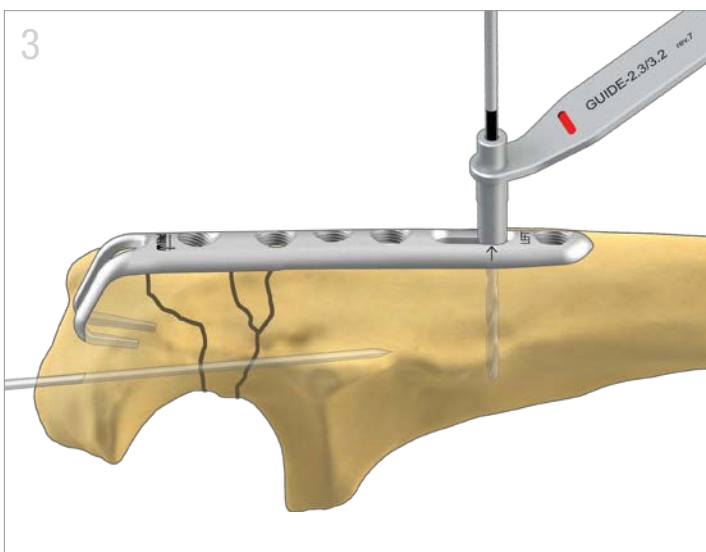


Inserción de la Hook Plate

- Inserte los ganchos de la placa en los orificios perforados en el olécranon.
- Asiente el impactador entre los dos ganchos e impacte la placa en el fragmento distal.
- Confirme que la reducción sea la adecuada.
- Coloque un tornillo cortical de 3,2 mm sin bloqueo en el extremo del orificio ranurado que está más alejado de la fractura.

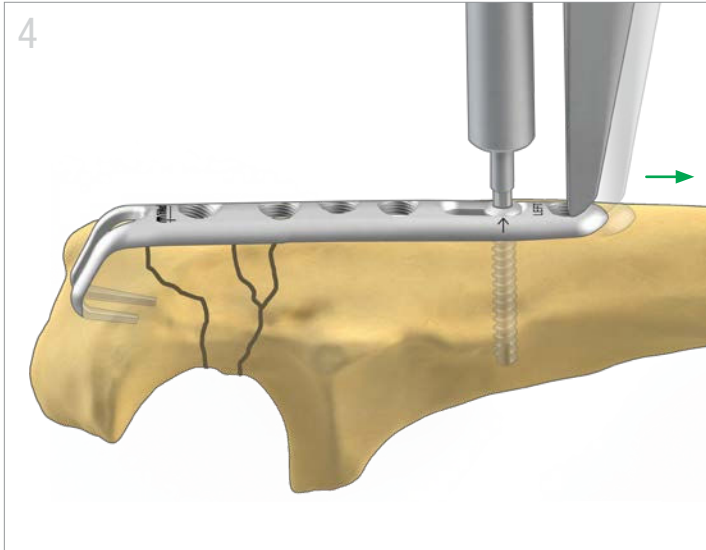

Expander/Compression Tool

- Inserte la punta del destornillador de la Expander/Compression Tool en la cabeza del tornillo y enganche la mordaza en el orificio del tornillo adyacente lejos de la fractura u osteotomía.
- Afloje el tornillo **1/4** de vuelta.
- Apriete con suavidad la Expander/Compression Tool para obtener la compresión deseada. Apriete el tornillo.

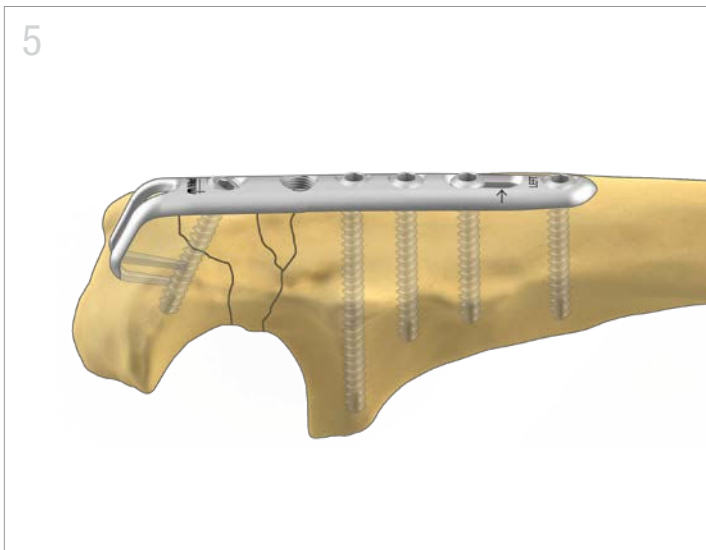

Fijación final

- Fijación completa con tornillos corticales de 3,2 mm, según sea necesario.

Todos los implantes están hechos con acero inoxidable de grado quirúrgico

Olecranon Hook Plate™

Neutro
OHOOK-4

Izquierda
OHOOKL-6
OHOOKL-8
OHOOKL-10*
OHOOKL-13*
OHOOKL-17*

Derecha
OHOOKR-6
OHOOKR-8
HOOKR-10*
OHOOKR-13*
OHOOKR-17*

*Pedido especial



Expander/ Compression Tool

XPANDR



Olecranon Hook Plate™ Guía de broca

GDOHOOK-2.3



Drill Guide

GUIDELCBS-2.3



Tornillo cortical

HEX3.2-xx
De 08 mm a 40 mm



Tornillo de bloqueo cortical

LCBS3.2-xx
De 08 mm a 30 mm



Impactor

IMPCT-SLED



TriMed, Inc. / 27533 Avenue Hopkins / Valencia, CA 91355 EE. UU. / 800-633-7221 / www.trimedortho.com

La técnica que se presenta en este documento es una sugerencia de técnica quirúrgica. La decisión de utilizar un implante específico y la técnica quirúrgica debe basarse en un criterio médico sólido por parte del cirujano que tenga en cuenta factores como las circunstancias y la configuración de la lesión.

TriMed, Inc. realiza el control de este documento. Cuando se descarga, imprime o copia este documento, se pierde el control del mismo. Por ese motivo, los usuarios deberían consultar siempre trimedortho.com para obtener la última versión.

Para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones relacionadas con el sistema TriMed para el codo y el antebrazo, consulte las IU en trimedortho.com/ifu.

Para obtener toda la información sobre patentes, consulte trimedortho.com/patents.